



LIMPHATIC

preso-terapijski sistem za automatsku limfnu drenažu i intermitentnu pneumatsku kompresiju (IPK)

LIMFNA DRENAŽA

Limfni sistem služi za odvod međućelijske tečnosti u tkivima. On apsorbuje i transportuje masne kiseline i masti do sistema cirkulacije i vrši transport antigenskih ćelija do limfnih čvorova gde se stimuliše odgovor imunološkog sistema. Bolesti i poremećaji limfnog sistema obično izazivaju oticanje, kao i druge probleme.

PROXIMA LIMPHATIC je digitalni mikroprocesorski uređaj koji radi na principu pneumatske preso-terapije. Vazduh se upumpava u komore manžetni pri čemu se vrši blaga masaža koja potpomaže prirodnu cirkulaciju limfe kroz telo, slično postupku terapeuta kod manuelne limfne drenaže. Oslobođanje i kompresija vaskularnih i limfnih struktura tokom drenaže trenutno rezultira povećanom količinom krvi obogaćene hranljivim elementima i eliminacijom fluida i metaboličkih otpadnih produkata. Ovo dovodi do smanjenja edema, stimulacije sporog imunološkog sistema, smanjenja ožiljaka i redukcije celulita.

LAK ZA KORIŠĆENJE, EFIKASNA TERAPIJA


Pritisak u komorama je lako podesiv i može se pratiti i kontrolisati putem prednjeg kosog panela uređaja. **LIMPHATIC** se odlikuje veoma intuitivnim korisničkim interfejsom i inovativnim načinom zadavanja parametara digitalnim enkoderom. Svi parametri su prikazani na LCD karakter displeju. Terapiju je u svakom momentu moguće prekinuti i nastaviti.

INDIKACIJE

- primarni limfni edemi
- sekundarni limfni edemi
- post-traumatski edemi
- hronična venska insuficijencija
- statički edemi
- prevencija tromboze dubokog venskog sistema (postoperativno, inaktivitet, oduzetosti nogu)
- artroze
- algodistrofijski sindrom
- Carpal tunnel sindrom
- trofički poremećaji kože
- celulit
- sindrom teških nogu
- prevencija varikoznih vena
- lipoedem
- postliposukcijska nega
- detoksifikacija

Jedinstveni sistem za povezivanje manžetni i uređaja **CLICK 'N CONNECT**. Povezivanje manžetni i uređaja je veoma jednostavno putem četiri pneumatska konektora jednostavnim pritiskom i izvlačenjem svakog odvoda pojedinačno.

*Unique connection system **CLICK 'N CONNECT** between garments and device. Connecting or disconnecting garments to device is very simple by applying small pressure to four connectors and taking them out, one by one.*

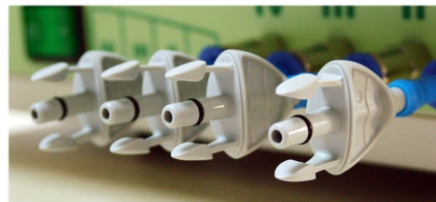

Četvorosegmentna manžetna za ruke.
Four chambers arm garment.



Četvorosegmentna manžetna za noge.
Four chambers leg garment.



Napajanje	230V 50Hz
Max. pritisak:	100mmHg u distalnoj komori
Odnos broja ciklusa radni : mirujući	4 : 1
Trajanje jednog ciklusa	za ruku od 20s do 250s za nogu od 30s do 250s
Razlika pritisaka	od 3 do 30mmHg
Vreme terapije	max. 240min
Tačnost	+/- 1mmHg

Power supply	220V 50Hz
Max. pressure:	100mmHg in distal chamber
Cycle number ratio woking : resting	4 : 1
One cycle time	for arm from 20s to 250s for leg from 30s to 250s
Pressure difference	from 3 to 30mmHg
Therapy time	max. 240min
Precision	+/- 1mmHg

ŠIFRE ZA PORUČIVANJE

Aparat LIMPHATIC	PX-AP-2020
Manžetna za nogu	PX-AP-2020-02
Manžetna za ruku	PX-AP-2020-01
Mrežni kabli	PX-AP-11

ORDER CODES

Device LIMPHATIC	PX-AP-2020
Legs garment	PX-AP-2020-02
Arms garment	PX-AP-2020-01
Mains cable	PX-AP-11



PROXIMA d.o.o.
Moravska 7, Čokot 18250 Novo Selo, Niš
Tel: ++381 18/ 4291 -290 ; 4291-288
Tel/fax: ++381 18/ 4267-469

www.proxima-medical.rs office@proxima-medical.rs